


Agradecemos a compra do Aspirador Elétrico Nasal Tommee Tippee. Esta informação ajudará ao seu uso de modo seguro, e a responder às dúvidas que possam surgir.

Desde o Nascimento e até ao ano, os bebés respiram unicamente pelo nariz. Durante este tempo, são incapazes de assoar o nariz sózinhos (não é muito comum que o consigam fazer até por volta dos dois anos), por isso quando estão muito entupidos, é realmente importante aliviar a congestão com o aspirador nasal, para que possam voltar a respirar comodamente.

Aspirador Nasal Características e Vantagens

Partes que o compõem

1. Tampa removível para boquilhas descartáveis. Girar para retirar.
2. Aro de Silicone
3. Botão de acender/Apagar
4. Tampa das pilhas
5. Depósitos descartáveis x 25
6. Compartimento para os depósitos descartáveis
7. Ponta de silicone Rosa 0-3 Meses
8. Ponta de silicone Azul 3-12 Meses
9. Ponta de silicone Laranja 12+ Meses
10. Aro de vedação em silicone de reposição

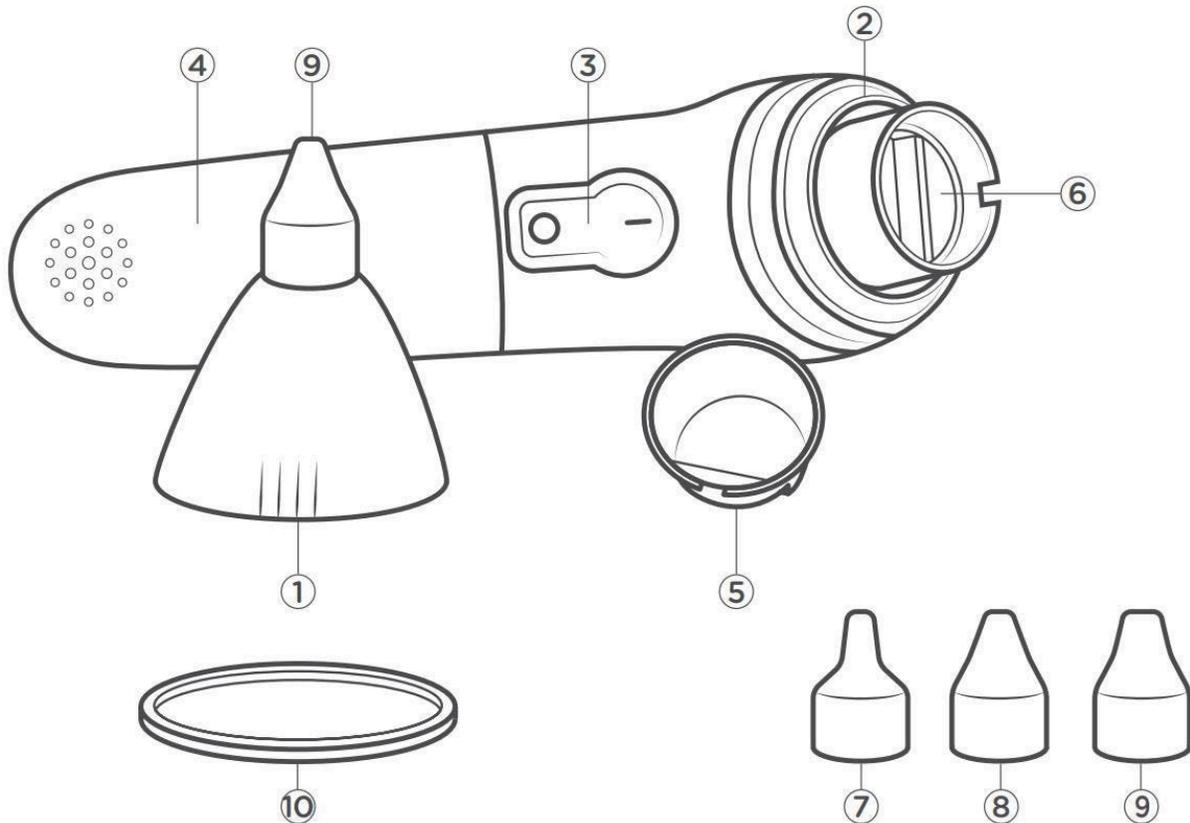

Modo de uso

Para iniciar o seu uso, siga as instruções abaixo...

1. Lave as suas mãos antes de usar.
2. Lave e esterilize a tampa transparente, o aro de vedação e a ponta do aspirador. A depósito descartável pode ser reusada sempre que lave as mãos cuidadosamente entre cada uso.
3. Coloque a depósito descartável no aparelho, coloque o anel vedante no seu sitio agora coloque a tampa transparente no topo – gire para ficar fechado e vedado no seu sitio.
4. Selecione a ponta correta para a idade do bebé ou criança.
5. Assegure-se de que o bebé tem a boca aberta. Coloque a ponta no nariz do bebé.
ATENÇÃO! Não introduza a ponta profundamente no nariz do bebé/ criança.
ATENÇÃO! Não pressione a ponta com força contra a parede nasal do bebé/ criança.
ATENÇÃO! Não utilize este aparelho nos ouvidos, nos olhos ou na garganta, o aparelho está desenhado unicamente para a limpeza das mucosidades nasais do bebé/criança.
ATENÇÃO! Enquanto estiver a usar o aspirador no bebé NÃO lhe bloqueie a outra narina.
6. Pressione “i” para ativar o aparelho unicamente em aspiração de uns segundos.
7. Use apenas uns segundos para limpar as mucosidades.
8. Apague o aparelho pressionando “O”.
9. Desmonte a tampa e retire a depósito descartável que contém as mucosidades. Elimine as mucosidades.
10. Lave, esterilize e seque a tampa transparente e a depósito descartável. Lave e seque a depósito descartável ou utilize outra de reposição. Monte a tampa, depósito descartável e a ponta de silicone.
11. Limpe o aparelho com um pano macio. **ATENÇÃO!** Não imergir o aparelho em água. Use sempre o aparelho com a depósito descartável colocada para guardar as mucosidades. Sempre que a depósito esteja dois terços cheia mude ou esvazie a depósito descartável. Não incline ou vire o aspirador ao contrário, se a depósito tiver mucosidades, já que podem bloquear o aspirador.

Como colocar ou trocar as pilhas?

Na imagem (abaixo) mostra como mudar as pilhas do aparelho...

1. Retire a tampa das pilhas.
2. Introduza 2 x AA pilhas alcalinas.
3. Deslize de novo a tampa para fechar até que ouça um click. Não use pilhas recarregáveis.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Porquê o meu aparelho não aspira?

Lamentamos que esteja a experimentar dificuldades no uso do seu aspirador nasal. Para restabelecer o funcionamento rapidamente...

- Comprove que o aro de silicone de vedação está bem colocado no seu sitio.
- Comprove que a tampa transparente está bem vedada e fechada no seu sitio.
- Comprove que a tampa está is corretamente montada.

Porquê não funciona o botão de acender/apagar do meu aspirador?

Verifique que as baterias estão corretamente colocadas. Se já estão a chegar ao fim, introduza pilhas novas. Não use pilhas recarregáveis.

Há peças de reposição para o aspirador?

Sim! Por favor contacte o seu ponto de venda para que lhe informem de quais podem ser adquiridos.

Aspetos técnicos

Este aparelho cumpre com a directiva europeia 93/42/EEC relativa a artigos medicos, e os a normativa europeia EN60601-1-2 e está sujeito a precauções especiais relativos à compatibilidade eletromagnética.

CUIDADO DE USO

Assegure-se de que o bebé abre a boca ao usar o aspirador.

Não bloqueie a outra narina do bebé quando utilize o aspirador.

Limpe o aspirador depois de cada uso.

Não guarde o aparelho com as mucosidades no depósito descartável ou sujo.

Esterilizar o aspirador depois de cada uso.

Retire as pilhas se não usar o aspirador por uns 14 dias.

Insira corretamente o aro de vedação de silicone antes de cada uso.

Manter fora do alcance das crianças.

Não utilize o aspirador se existe alguma ferida, infeção ou sangrado no nariz e consulte o pediatra.

Utilize apenas os acessórios que vêm incluídos com o aspirador.